

## FFP2 NR Filtrierende Halbmaske

### Beschreibung:

Diese fünflagige Maske ist CE-zertifiziert und entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung und den Anforderungen der harmonisierten Norm EN 149:2001 + A1:2009. Sie dient zum Schutz vor Staub, Bakterien und anderen Partikeln.

### Eigenschaften

Form:	Faltbar
Größe:	Normal
Partikelfiltereffizienz:	≥95% (Test gemäß EN 149 FFP2 NR)
Normen:	EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

### Aufsetzanleitung:

1. Öffnen Sie die Packung, entnehmen Sie die Masken an den beiden Schnüren heraus.
2. Öffnen Sie die Maske mit dem Nasenrücken nach oben und die Innenseite der Maske zu Ihnen gewandt. Führen Sie Ihre Finger durch die elastischen Bänder und setzen die Maske, mit dem Nasenrücken nach oben, über Ihre Nase und Mund.
3. Platzieren Sie den unteren Rand der Maske unterhalb Ihres Kinns und die obere Kante der Maske auf Ihren Nasenrücken. Führen Sie die elastischen Bänder über Ihre Ohren.
4. Setzen Sie Ihre Fingerspitzen an den metallischen Nasenrücken der Maske an und drücken das metallische Nasenstück an die Form Ihrer Nase an.
5. Die Abdichtung muss vor dem Gebrauch getestet werden. Setzen Sie hierzu beide Hände an der Maske an und atmen kräftig aus. Sie sollten nun einen Druck innerhalb der Maske spüren. Sollte Luft an den Seiten der Maske austreten, passen Sie die Position der Maske an und ziehen Sie, falls notwendig, die elastischen Bänder strammer an.

### Wichtig:

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Maske sicher, dass die Maske für den Verwendungszweck geeignet ist. Der Verwender muss im korrekten Umgang mit der Maske geschult sein, um die richtige Passform sicher zu stellen.
2. Vermeiden Sie das Berühren der Innenseite der Maske, um eine Kontamination der Maske zu vermeiden.
3. Dieses Produkt ist nur für den Einweggebrauch und muss nach der Verwendung entsorgt werden.
4. Patienten mit Herzerkrankungen, Atemwegserkrankungen oder anderen Erkrankungen, sollen die Maske entsorgen, sollte das Atmen darin schwerfallen.
5. Eine Maske, welche mit „NR“ gekennzeichnet ist, kann nur einmalig, z.B. für eine Schicht verwendet werden.
6. Verwenden Sie die Maske nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



ETIKETTEN



THT-FARBBÄNDER



DRUCKSYSTEME



SOFTWARE



GEBÄUDE- UND SICHERHEITS-KENNZEICHNUNG




ABSPERR- UND VERRIEGELUNGS-SYSTEME



LOHN-BEDRUCKUNG



ADSORPTIONS-MITTEL

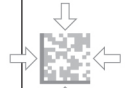

LASER-BESCHRIFTUNG ETIKETTIER-SYSTEME SCANNER

#### Postanschrift / Postal address:

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH  
Industriestraße 28a ■ D-68519 Viernheim  
☎ +49 (0) 62 04 / 6 08 91-0  
☎ +49 (0) 62 04 / 6 08 91-0  
✉ info@qmik.de 🌐 www.qmik.de

#### Bankverbindung / Banking details:

VR Bank Rhein-Neckar eG  
Konto-Nr.: 85648900  
BLZ: 670 900 00  
IBAN Nr.: DE8467090000085648900  
BIC: GENODE61MA2

#### Geschäftsführer / Managing Director:

Rainer Deppner / Christopher Hergesell  
HRB: Amtsgericht Darmstadt  
Reg.-Abtlg. Lampertheim, Nr.: 86545  
USt.-Ident-Nr. / VAT-ID-Nr.: DE 259 717 377

Schreiben vom 29. Januar 2021, Seite 2 von 2

7. Diese Maske kann nicht mit Wasser gewaschen werden, da dies die Struktur des Filtermaterials und die Filtration des elektrostatischen Filtermaterials zerstört. Lagern Sie die Maske ordnungsgemäß und stellen sicher, dass die Maske sich in der Lagerung nicht verformt.
8. Die Maske darf nicht in der Mikrowelle sterilisiert werden.

**Lagerung:**

1. Die Masken sollten in einer gut belüfteten, trockenen und dunklen Umgebung gelagert werden. Von Feuer, Kontamination und möglichen Kontaminationsquellen fernhalten.
2. Lagertemperatur: -20°C bis +40°C mit weniger als 50% relativer Luftfeuchtigkeit.
3. Bewahren Sie die Masken während des Versands in der originalen Verpackung auf, um Sie vor physischen Schäden und Kontamination zu schützen.



ETIKETTEN



THT-FARBÄNDER



DRUCKSYSTEME



SOFTWARE



GEBÄUDE- UND SICHERHEITS-KENnzeICHNUNG




ABSPERR- UND VERRIEGELUNGS-SYSTEME



LOHN-BEDRUCKUNG



ADSORPTIONS-MITTEL

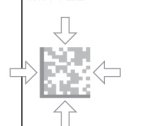

LASER-BESCHRIFTUNG ETIKETTIER-SYSTEME SCANNER

**Postanschrift / Postal address:**

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH  
Industriestrasse 28a • D-68519 Viernheim  
☎ +49 (0) 62 04 / 6 08 91-0  
✉ +49 (0) 62 04 / 6 08 91-60  
✉ info@qmik.de 🌐 www.qmik.de

**Bankverbindung / Banking details:**

VR Bank Rhein-Neckar eG  
Konto-Nr.: 85648900  
BLZ: 670 900 00  
IBAN Nr.: DE8467090000085648900  
BIC: GENODE61MA2

**Geschäftsführer / Managing Director:**

Rainer Deppner / Christopher Hergesell  
HRB: Amtsgericht Darmstadt  
Reg.-Abtlg. Lampertheim, Nr.: 86545  
USt.-Ident-Nr. / VAT-ID-Nr.: DE 259 717 377